


Proovimaterjalide pakendamine torupostiga saatmiseks patoloogiakeskusesse

Histoloogilise uuringu proovimaterjalide saatmiseks torupostiga kasutada keeratava kaanega analüüsitopse, mille maksimaalne läbimõõt on 9 cm.

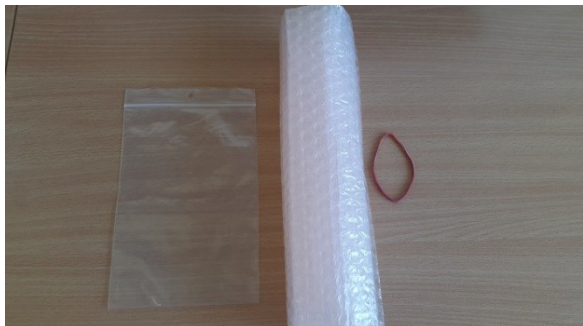

1. Vahendid pakendamiseks: minigrip-kott, mullikile, kumm.



2. Histoloogiliseks uuringuks saadetavate proovimaterjalide pakendamine.



3. 1 Tsütoloogiliseks uuringuks saadetavate vedelike pakendamine.



3.2 Tsütoloogiliseks uuringuks saadetavate preparaadiklaaside pakendamine.

Eneken Helk
Osakonna juhtiv bioanalüütik
617 2393



4. Pakenda minigrip-kotis olevad analüüsitopsid või transpordikarbis olevad preparaadiklaasid omakorda mullikillesse.



5. Kinnita mullikile kummiga ja aseta saadeti toruposti kapslisse.