

## PROOVIMATERJALIDE PAKENDAMINE TORUPOSTIGA SAATMISEKS

			
<p>1. Pakendamiseks vajalikud vahendid: minigrippkott, mullikile ja kumm.</p>	<p>2.1 Vereproovide pakendamine</p>	<p>2.2 Uriiniproovide pakendamine</p>	<p>2.3 Roe proovinõu pakendamine ( NB! proovinõu kaas üle kontrollida ja korrektselt sulgeda enne pakendamist)</p>
			
<p>3. Valmis pakendid (lekke minimaliseerimiseks)</p>	<p>4. Mullikilesse pakendamine (saadetise fikseerimiseks)</p>	<p>5. Mullikile fikseerimine kummiga (oluline iseavaneva saadetise kapslist väljutamise tagamiseks)</p>	<p>6. Pealtvaade mullikilega pakendamisel</p>

Jane Kurm  
Laboratooriumi juhtiv bioanalüütik  
617 1162